

LADING AV WIDEX LOMMELADER

Det interne batteriet til lommeladeren kan lades ved hjelp av en USB-C-kabel til strømforsyning eller en Qi-pad-lader for trådløs lading. Widex SmartRIC-høreapparater kan alltid lades hvis laderen er koblet til strømnettet eller plassert på en Qi-pad-lader. Imidlertid må det interne batteriet til laderen lades for å bruke laderen når du er på farten.



Lysindikator

Det er tre LED-indikatorer på bunnen av laderen som viser strøm- og batteristatus.

Laderen er ikke koblet til strømnettet:

● ● ●	12 sek	+3 fulle høreapparatladninger
● ● ○	12 sek	Min. 2 fulle høreapparatladninger
● ○ ○	12 sek	Min. 1 fullhøreapparatladninger
☀	12 sek	Mindre enn 1 høreapparatladninger igjen

Laderen er koblet til strømnettet (USB-C/Qi-pad):

● ● ●	Intern batteri fulladet
● ● ●	Intern batteri lades; < 3 fulle høreapparatladninger
● ● ○	Intern batteri lades; < 2 fulle høreapparatladninger
● ○ ○	Intern batteri lades; < 1 full høreapparatladninger

Andre lysindikasjoner som kan vises:

● ● ●	Dempende grønn	Innen 10 sekunder etter et langt trykk på knappen - laderen slås av.
● ● ●	Dempende oransje	Høy temperatur, lading er satt på pause (Qi-pad-lading).
● ● ●	Solid grønn	Batteriet er fulladet, ladingen er stoppet (Qi-pad-lading)
● ● ●	Blinkende rød	Feil under Qi-pad-lading, spenningen er utenfor rekkevidde.
● ● ●	Blinkende rød 12 sek	Intern batteritemperatur er for høy eller for lav, ladingen er stoppet.

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

WIDEX

WIDEX SMARTRIC™

HURTIGGUIDE

Velkommen til en ny grad av naturlig hørsel med nye Widex SmartRIC™ – et høreapparat med smart design som ytterligere støtter brukeren.



Denne hurtigguiden gir deg en oversikt over de viktigste opplysningene om Widex SmartRIC høreapparater med lommelader.

RECEIVERS OG EARWARE

Widex SmartRIC-høreapparatet er kompatibelt med **V.2 M- og P-Receiver**.

Det kan brukes med følgende instant ear-tips:



Åpen



Ooen round



Tulip



Round



Sleeve Vented



Dobbel



Sleeve Power

Hva med custom propper?

Hvert øre (kanal) er unikt, og det påvirker størrelsen på en custom propp. Det er viktig at du sjekker størrelsen i forhold til tilgjengelig plass i laderen.

TILBEHØR

Widex SmartRIC er også kompatibelt med vårt omfattende utvalg av tilbehør.

Widex Sound Assist
Bluetooth-strømming, fjernkontroll, bordmikrofon, telecoil-funksjonalitet



Widex SoundConnect
Lydstrømming fra PC-er og bærbare datamaskiner



Widex TV Play
Lydstrømming fra fjernsyn



Widex RC-DEX
Fjernkontroll – volum, programendringer



APPER

Flere Widex-apper er også kompatible med Widex SmartRIC. Disse inkluderer:



WIDEX MOMENT™
Kontroller volumet og endre programmer og tilpass lyden med MySound



WIDEX REMOTE CARE™
Utfør fjerninnstillinger og tilpasninger av høreapparatet



WIDEX TONELINK™
Grunnleggende fjernkontrollfunksjoner

LED-INDIKATOR

Widex SmartRIC leveres med en smart LED-indikator for å vise sammenkoblings-, batteri- og strømstatus.

Lysindikatorer	Status
Fem sakte grønne blink 	Høreapparatet slås på.
Seks grønne blink 	Høreapparatet er koblet til en Bluetooth-enhet
Kontinuerlige grønne blink* 	Høreapparatet er på, batteri > 20 %.
Kontinuerlige røde blink* 	Høreapparatet er på, batteri < 20 %.

* Ekstra alternativ som kan aktiveres.

FEATURES

Widex SmartRIC er tilgjengelig i prispunktene 440, 330, 220 og 110.

KEY FEATURES	440	330	220	110
Performance	Fremragende	Høy	Mellem	Basis
Behandlings- og finjusteringskanaler	15	12	10	6
Widex PureSound™ med ZeroDelay™ teknologi	•	•	•	•
TruAcoustics™ med Personal Gain Integrator	•	•	•	•
CONNECTIVITY	440	330	220	110
2.4 GHz kontrol (Android og iOS)	•	•	•	•
2.4 GHz lydstrømming (iOS og ASHA)	•	•	•	•
WidexLink lydstrømming DEX assistive listening devices†	•	•	•	•

APPs FOR iOS & ANDROID	440	330	220	110
MOMENT App med SoundSense Learn	•	•	•	
MOMENT App	•	•	•	•
TONELINK App	•	•	•	•
COM-DEX App	•	•	•	•
Widex Remote Care App	•	•	•	•

FEATURES	440	330	220	110
Adaptation Manager	•	•	•	•
Fluid Sound Analyzer (Sound Classes)	11	7	4	3
Programmer	5	4	3	3
Smartwind Manager	•			
Høyfrekvensforsterkning	•			
Speech Enhancer RT	RT/IE	IE		
HD Locator	•	•	•	
TruSound Softener	•	•	•	
SoundSense Adapt	•	•	•	
Preferansestyring	•	•	•	•
LED-lysindikator	•	•	•	•
Støyreduksjon på mykt nivå	•	•	•	•
Støyreduksjon	•	•	•	•
Zen/SoundRelax	•	•	•	•
Audibility Extender	•	•	•	•

†Inkludert Widex Sound Assist, TV-PLAY, RC-DEX, TV-DEX, COM-DEX, FM+ DEX.

WIDEX SMARTRIC™

LOMMELADER GUIDE

Widex SmartRIC™ er et fullt oppladbart høreapparat som bruker en kompakt og stilig lommelader for lading på farten. Den minimalistiske laderen gir brukeren mer enn en ukes autonomi, med enestående batterilevetid.



Denne raske referanseguiden gir deg en oversikt over de viktigste opplysningene om denne WPP401 Widex Lommelader.

OVERSIKT

Her er et kjapt blikk på de ulike komponentene til den nye Widex-laderen.



LADING AV WIDEX SMARTRIC™ HØREAPPARATER



Fra 0% batteristatus vil en full lading av høreapparatet ta omtrent **4 timer**.



Hvis batteriet på høreapparatet er < 40%, aktiveres **rask lading**, og en **30-minutters lading** vil gi opptil **8 timers** bruk av høreapparatet.



Lysindikator

Det er en LED-indikator for hvert høreapparat på forsiden av laderen. Dette betyr ulike lysindikasjoner:

Hvis laderen ikke er koblet til strømmettet:

	12 sek	Høreapparatet er fulladet.
	12 sek	Høreapparatet lades.

Hvis laderen er koblet til strømmettet via en USB-C-kabel eller lades på en Qi-pad-lader, vil lysindikatorene forbli opplyst.

Andre lysindikasjoner som kan vises:

	Dempende grønn	Innen 10 sekunder etter et langt trykk på knappen - laderen slås av.
	Blinkende oransje	Høy temperatur på høreapparatet (Qi-pad-lading); lading vil fortsette når temperaturen synker.
	Blinkende rød	Høy temperatur på høreapparatet (normal lading); lading vil fortsette når temperaturen synker.



Hvert høreapparat lades uavhengig, dvs. hvis ett høreapparat er fulladet og det andre ikke er det, vil bare det høreapparatet med lavt batteri lades.