


ÖVERSIKT

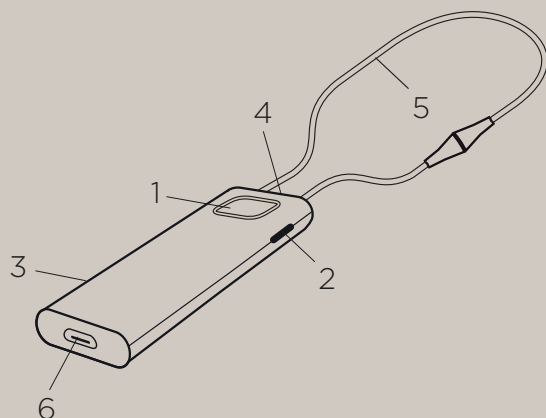

1. Huvudknapp
(svara och lägga på för telefonsamtal)
2. Mute-knapp för hörapparaternas mikrofoner
(när man endast vill höra ljudet som streamas och ej omgivningsljuden)
3. LED lampa
4. Mikrofon
5. Halsslinga
6. Micro USB laddningsingång

Anslut COM-DEX till telefon/enhet

- Stäng halsslingan på COM-DEX (LED-lampan börjar blinka rött och blått).
- Gå in i telefonens/enhetens Bluetooth inställningar, aktivera Bluetooth.
- Namnet "COM-DEX" + 3 siffror ska nu dyka upp i listan över hittade Bluetooth enheter.
- Klicka på "COM-DEX" för att ansluta. Om du ej ser namnet "COM-DEX" dyka upp prova att slå av och slå på Bluetooth funktionen.

FÖR MER SUPPORT:
www.widex.se/apps

FÅ INFORMATION OCH NYHETER:
www.widex.se/nyhetsbrev

BESTÄLL TILLBEHÖR:
www.widexbutik.se



DEX™
A WIRELESS WORLD

2021-03 / 9 504 1026 012



COM-DEX

SNABBGUIDE

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

Hantering


COM-DEX behöver ej paras ihop med hörapparaterna utan endast anslutas via Bluetooth till den enhet man önskar streama ljudet ifrån.

- Du slår på och av COM-DEX genom att öppna och stänga halsslingan.
- Halsslingan skall vara öppen vid laddning.
- Efter 3 timmar är COM-DEX fulladdad.
- En fulladdad COM-DEX håller för 8 timmar streaming och 8 dagar "standby" läge.
- COM-DEX kan parkopplas med upp till 8 st olika enheter och 2 st enheter kan vara anslutna samtidigt. För att ansluta 2 st enheter gör som följande:
 1. Anslut den första enheten, stäng sedan av Bluetooth på denna enhet
 2. LED-lampan på COM-DEX börjar då blinka rött och blått
 3. Anslut till den andra enheten,
 4. Slå på Bluetooth på den första enheten igen, du kan behöva att återkoppla COM-DEX här igen genom att klicka på namnet under listan för sammankopplade enheter.
- Det går att ansluta COM-DEX till en dator, ibland behövs en Bluetooth dongel, till exempel: Sennheiser BTD 500 USB.
- Placera COM-DEX ovanpå klädesplagget vid samtal, vid stökiga miljöer placera COM-DEX närmare munnen.



Använd COM-DEX appen tillsammans med din COM-DEX


Tillsammans med COM-DEX har man möjlighet att använda vår COM-DEX app. I COM-DEX appen kan man göra vissa justeringar i sina hörapparater som att ändra volym, byta program samt ändra riktningfokus på hörapparaternas mikrofoner. Sök på "COM-DEX" i app store eller Google Play.

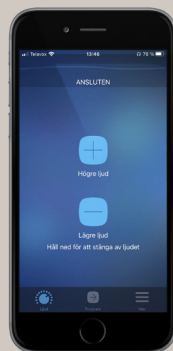


Höj och sänk ljudet i hörapparaterna




Byt program i hörapparaterna

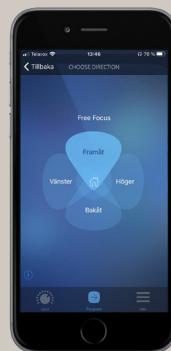

Ändra riktningfokus på hörapparaternas mikrofoner

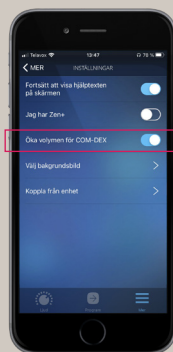

Öka volymen på det streamade ljudet (Klicka på "MER" och "INSTÄLLNINGAR")

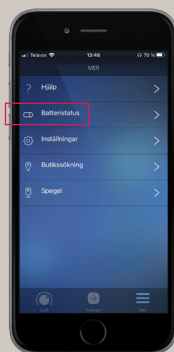

Kontrollera batteristatus på COM-DEX (klicka på "MER" och "BATTERISTATUS")



Batteristatus

BRA TIPS!

- Använd mute-knappen på sidan av COM-DEX för att tysta hörapparaternas mikrofoner när du blir störd av omgivningsljud samtidigt som du streamar ljud.
- Öka volymen på ljudet från COM-DEX med hjälp av funktionen "ÖKA VOLYMEN FÖR COM-DEX" som finns i COM-DEX appen. Klicka på **MER - INSTÄLLNINGAR** och aktivera funktionen "ÖKA VOLYMEN FÖR COM-DEX".
- I COM-DEX appen kan du se batteristatus för din COM-DEX. Klicka på **MER—INSTÄLLNINGAR** och "**BATTERISTATUS**".
- Vid anslutningsproblem, prova att göra en återställning på följande sätt:
 1. Se till att COM-DEX ej är ansluten till någon Bluetooth enhet (LED-Lampan på sidan av COM-DEX ska blinka rött och blått)
 2. Håll in båda knapparna på COM-DEX samtidigt tills du ser att det blir ett fast rött sken på LED-lampan
 3. Det blir sedan ett kort lila sken och sedan börjar LED-lampan blinka rött och blått igen, öppna halsslingan i tio sekunder, återställningen är nu klar.