

LADDNING AV WIDEX PORTABLA LADDARE

Det interna batteriet på den portabla laddaren kan laddas med hjälp av en USB-C-kabel till elnätet eller en Qi-pad-laddare för trådlös laddning.

Widex SmartRIC-hörapparater kan alltid laddas även om laddaren är ansluten till elnätet eller placeras i en Qi-pad-laddare. Dock måste det interna batteriet på laddaren laddas för att använda laddaren på språng.



Ljusindikator

Det finns tre LED-ljusindikatorer längst ner på laddaren som visar ström- och batteristatus.

Laddaren är inte ansluten till elnätet:

● ● ●	12 sek	3 + fulla hörapparatladdningar
● ● ○	12 sek	Minst 2 fulla hörapparatladdningar
● ○ ○	12 sek	Minst 1 full hörapparatladdning
☀	12 sek	Mindre än 1 hörapparatladdning kvar

Laddaren är ansluten till elnätet (USB-C/Qi-pad):

● ● ●	Internt batteri fulladdat
● ● ●	Internt batteri laddas; < 3 fulla hörapparatladdningar
● ● ○	Internt batteri laddas; < 2 fulla hörapparatladdningar
● ○ ○	Internt batteri laddas; < 1 full hörapparatladdning

Andra ljusindikationer som kan förekomma:

● ● ●	Blinkande grönt	Inom 10 sekunder efter ett långt tryck på knappen - laddaren stängs av.
● ● ●	Blinkande orange	Hög temperatur, laddningen pausas (Qi-pad-laddning).
● ● ●	Fast grönt	Batteriet är fulladdat, laddningen har stoppats (Qi-pad-laddning)
● ● ●	Blinkande rött	Fel vid Qi-pad-laddning, spänningen är utanför räckvidd.
● ● ●	Blinkande rött 12 sek	Intern batteritemperatur är för hög eller för låg, laddningen har stoppats.

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER


WWW.WIDEXPRO.COM

WIDEX

WIDEX SMARTRIC™

SNABBGUIDE

Välkommen till **nya vinklar av naturlig hörsel** med den nya Widex SmartRIC™
– En hörapparat med smart design som ytterligare stöder användaren audiologiskt.

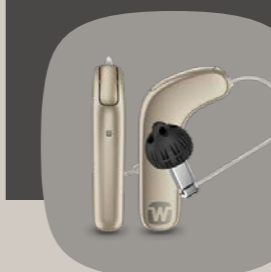

Denna snabbguide ger dig en översikt över de viktigaste funktionerna gällande Widex SmartRIC-hörapparaterna.

RECEIVERS OCH EARWARE

Widex SmartRIC är kompatibel med **wired V.2 RIC M och P högtalare**.

Den kan användas med följande instant ear-tips:



Öppen



Öppen Rund



Tulip



Rund



Sleeve Vented



Dubbel



Sleeve Power

Stort utbud av olika domer

Varje öra är unikt och det påverkar storleken på vald dome.

TILLBEHÖR

Widex SmartRIC är också kompatibel med vårt omfattande sortiment av tillbehör.

Widex Sound Assist
Bluetooth-streaming, fjärrkontroll, bordsmikrofon, telespole



Widex SoundConnect
Ljudstreaming från datorer



Widex TV Play
Ljudstreaming från TV-apparater



Widex RC-DEX
Fjärrkontroll – volym, programändringar



APPAR

Flera Widex-appar är kompatibla med Widex SmartRIC. Dessa inkluderar:



WIDEX MOMENT™
Kontrollera volymen och ändra program; anpassa ljudet med Mitt Ljud



WIDEX REMOTE CARE™
Utför fjärranpassningar och justeringar av hörapparaten



WIDEX TONELINK™
Grundläggande fjärrkontrollsfunktioner; ändra volym, byt program samt ändra riktningfokus

LED-LJUSINDIKATOR

Widex SmartRIC levereras med en smart LED-ljusindikator för att visa parning, batteri och strömstatus.

Ljusindikator	Status
Fem långsamma gröna blinkningar 	Hörapparaten startar.
Sex gröna blinkningar 	Hörapparaten har kopplats ihop med en Bluetooth-enhet.
Kontinuerliga gröna blinkningar* 	Hörapparaten är på, batteri > 20%.
Kontinuerliga röda blinkningar* 	Hörapparaten är på, batteri < 20%.

*Ytterligare alternativ som kan aktiveras.

FUNKTIONER

Widex SmartRIC finns tillgänglig i tekniknivåerna 440, 330, 220.

KEY FEATURES	440	330	220
Behandlings- och finjusteringskanaler	15	12	10
Widex PureSound™ med ZeroDelay™ teknologi	•	•	•
TruAcoustics™ med Personal Gain Integrator	•	•	•

CONNECTIVITY	440	330	220
2.4 GHz kontroll (Android and iOS)	•	•	•
2.4 GHz ljudstreaming (iOS and ASHA)	•	•	•
WidexLink till DEX tillbehör†	•	•	•

APPS FOR iOS & ANDROID	440	330	220
MOMENT App	•	•	•
TONELINK App	•	•	•
COM-DEX App	•	•	•
Widex Remote Care App	•	•	•

FEATURES	440	330	220
Adaptation Manager	•	•	•
Fluid Sound Analyzer (Sound Classes)	11	7	4
Program	5	4	3
Smartwind Manager	•		
High-frequency boost	•		
Speech Enhancer RT	RT/IE	IE	
HD Locator	•	•	•
TruSound Softener	•	•	•
SoundSense Adapt	•	•	•
Preference kontroll	•	•	•
LED-ljusindikator	•	•	•
Ljudnivåreducering	•	•	•
Bullerreducering	•	•	•
Zen/SoundRelax	•	•	•
Audibility Extender	•	•	•

†Ingår Widex Sound Assist, TV-PLAY, RC-DEX, TV-DEX, COM-DEX, FM+ DEX.

WIDEX SMARTRIC™

GUIDE FÖR PORTABEL LADDARE

Widex SmartRIC™ är en uppladdningsbar hörapparat som använder en smidig och stilfull portabel laddare för laddning på språng. Den portabla laddaren ger användaren mer än en veckas batteritid.



Denna guide ger dig en översikt över de viktigaste funktionerna om denna portabla laddare.

ÖVERSIKT

Här är en snabb titt på de olika komponenterna i den portabla Widex-laddaren.



LADDNING AV WIDEX SMARTRIC™ HÖRAPPARATER



Från 0% batteristatus tar det cirka **4 timmar** att ladda hörapparaterna fullt.



När batteristatusen är < 40% **aktiveras snabbladdning**, och en **30-minuters laddning** ger upp till **8 timmars** användning av hörapparaten.



Ljusindikator

Det finns en LED-ljusindikator för varje hörapparat på framsidan av laddaren. Här är en guide till de olika ljusindikationerna:

Om laddaren inte är ansluten till elnätet:

	12 sek	Hörapparaten är fulladdad.
	12 sek	Hörapparaten laddas

Om laddaren är ansluten till elnätet via en USB-C-kabel eller laddas på en Qi-pad laddare, kommer ljusindikatorerna fortsätta vara upplysta.

Andra ljusindikeringar som kan visas:

	Blinkande grönt	Inom 10 sekunder efter ett långt tryck på knappen - laddaren stängs av.
	Blinkande orange	Hög temperatur på hörapparaten (Qi-pad-laddning); laddningen fortsätter när temperaturen sjunker.
	Blinkande rött	Hög temperatur på hörapparaten (normal laddning); laddningen fortsätter när temperaturen sjunker.



Varje hörapparat laddas oberoende, dvs. om en hörapparat är fulladdad och den andra inte är det, kommer endast den hörapparaten med lågt batteri att laddas.